


Behuizing van de thermometer

BRAUN


**ThermoScan®
PRO 6000**

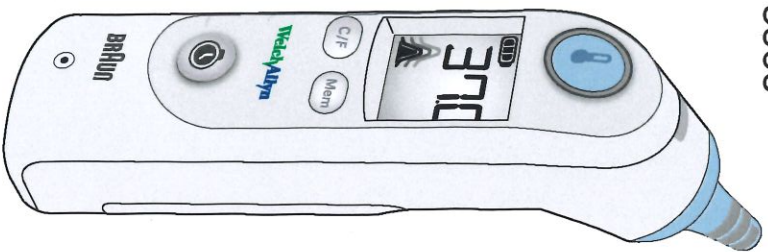


OPMERKING Plaats een nieuwe probe-cover op de thermometer voorafgaand aan het reinigen.

Goedgekeurde reinigingsmiddelen

- 70% isopropylalcohol of ethylalcohol
- Waterstofperoxide (Virox, Oxivir)
- Quaternaire ammoniumverbindingen (CaviWipes®, Clinell Universal Wipes®, SanCloth)
- 10% chloorbleekmiddeloplossing

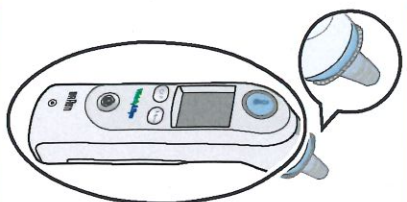


1

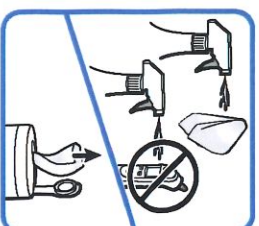

2



3

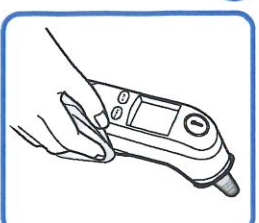


Veeg droog. Laat 5 minuten drogen.
Zorg ervoor dat de behuizing van de thermometer droog is voorafgaand aan gebruik.


Contacten van de thermometer

Goedgekeurde reinigingsmiddelen


- 70% isopropylalcohol of ethylalcohol

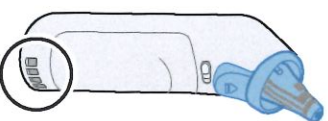

1

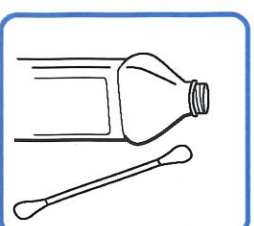

2

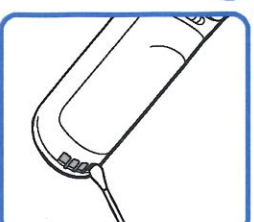


Leg de thermometer ongeveer 1 minuut opzij om de contacten aan de lucht te laten drogen.


Lenzenvenster en sonde

Goedgekeurde reinigingsmiddelen

- Uitsluitend 70% isopropylalcohol of ethylalcohol!

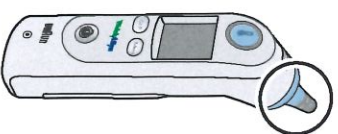

1

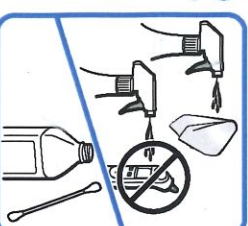

2




3



Veeg droog. Laat 5 minuten drogen.
Zorg ervoor dat het lenzenvenster van de sonde droog is voorafgaand aan gebruik.

800272724, versie A
Revisiedatum: 2021-1-04
©2021 Welch Allyn, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

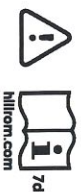

Dit product is geproduceerd door Welch Allyn, Inc onder licentie van handelsmerk 'Braun'. 'Braun' is een geregistreerd handelsmerk van Braun GmbH, Kronberg, Duitsland. ThermoScan is een geregistreerd handelsmerk in eigendom van Helen of Troy Limited.

Technische ondersteuning van Hillrom
hillrom.com/en-us/about-us/locations/
Welch Allyn, Inc. is een dochteronderneming van Hill-Rom Holdings, Inc.